

Газожидкостной уход для рук с применением Мультифакторной косметики

Процедура способствует обновлению и омоложению поверхности кожи кистей рук. Гель для рук (Гель) способствует:

- улучшению качества кожи,
- омоложению,
- восстановлению рельефа,
- нормализации цвета и плотности тканей.

Процедура эффективна для восстановления естественных ресурсов кожи.

Для проведения процедуры понадобится:

- Шприц
- 3 мл физ. Раствора
- Емкость для раствора (если подразумевает конструкция аппарата)
- 1 флакон средства «Мультифакторная косметика. Гель для рук» – активные ингредиенты» (Гель) – лиофилизат цитокинов и факторов роста

Не используйте гелевый растворитель из набора Мультифакторной косметики для данной процедуры (в виду высокой вязкости)

Пример протокола

Часть 1. Очистка

1. Очистите кожу рук от загрязнений.
2. Проведите процедуру газожидкостного пилинга кожи рук, используя только физ.раствор.

Часть 2. Введение активных компонентов

3. Возьмите из холодильника флакон Геля (активный компонент).
4. Аккуратно откройте флакон - на колпачке флакона присутствуют стрелочки, указывающие направление движения, потяните за пластиковую часть колпачка с этой стороны. С помощью шприца переместите 3 мл. физ. раствора во флакон.
5. Плавными движениями/покачиваниями перемешайте содержимое флакона. После полного растворения лиофилизата переместите состав в ёмкость, подходящую для работы с вашим газожидкостным аппаратом (шприц от насадки JetPeel, бутыль от аппарата). Важно: в зависимости от модели аппарата необходимо довести общий объем полученного раствора до объема, стандартно расходуемого в данном типе процедур. Например, для аппаратов JetPeel достаточно 3 мл, для других аппаратов – от 10 до 20 мл. Если в среднем расход раствора Вашего аппарата для аналогичных процедур больше 3 мл, то добавьте дополнительный объем физ. раствора в емкость с готовым составом.
6. Подключите ёмкость с составом к аппарату.
7. Работайте, перемещаясь по коже лица «сканирующими» движениями, расстояние от насадки до кожи пациента 0,3 – 0,5 см, угол наклона 90°. По возможности совершайте точечные остановки, осуществляя таким образом мягкое введение компонентов Геля.

Длительность процедуры – 10-15 минут.

Периодичность процедуры – 1-2 раза в неделю/ курс 3-5 недель.

Применение Геля – 1 доза во время процедуры (в составе раствора в насадке)

Видео-протокол процедуры можно посмотреть, отсканировав [QR-код](#) справа.

